

Instrukcja podawania kleju tkankowego w leczeniu hemoroidów

1. Klej jest oferowany w ampułkach o pojemności 1ml,
2. Przed aplikacją, klej mieszamy z glukozą 5% w stosunku 1:2 (1 porcja kleju:2 porcje glukozy 5%), wydłuża to czas polimeryzacji kleju. Całość mieszamy w strzykawce 2ml, najpierw pobieramy glukozę potem klej.
3. 1 ampułka kleju z glukozą wystarcza na pokrycie 3 guzków.
4. Do każdego guzka aplikujemy 1ml roztworu. Zalecamy mieszać klej z glukozą partiami, tzn mieszamy tyle kleju ile podajemy na raz czyli 0,3ml kleju:0,6ml glukozy. Nie zalecamy mieszania od razu całej ampułki. Mieszanka może się rozwarstwiać (każda z substancji ma inną gęstość),
5. Roztwór podajemy powyżej linii grzebieniastej, technika podawania wsteczna – wysuwamy igłę naciskając w tym samym czasie na tłok.
6. Każde podanie kleju aplikujemy czystą igłą,
7. Po każdej aplikacji wykonujemy ucisk palcem przez ok minutę w miejscu wkłucia,
8. Przed zabiegiem można podać znieczulenie,
9. Zabieg wykonujemy przy użyciu anoskopu